


FICHE D'UTILISATION PATIENT


HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Télécommande DEWERT

3 fonctions IP67

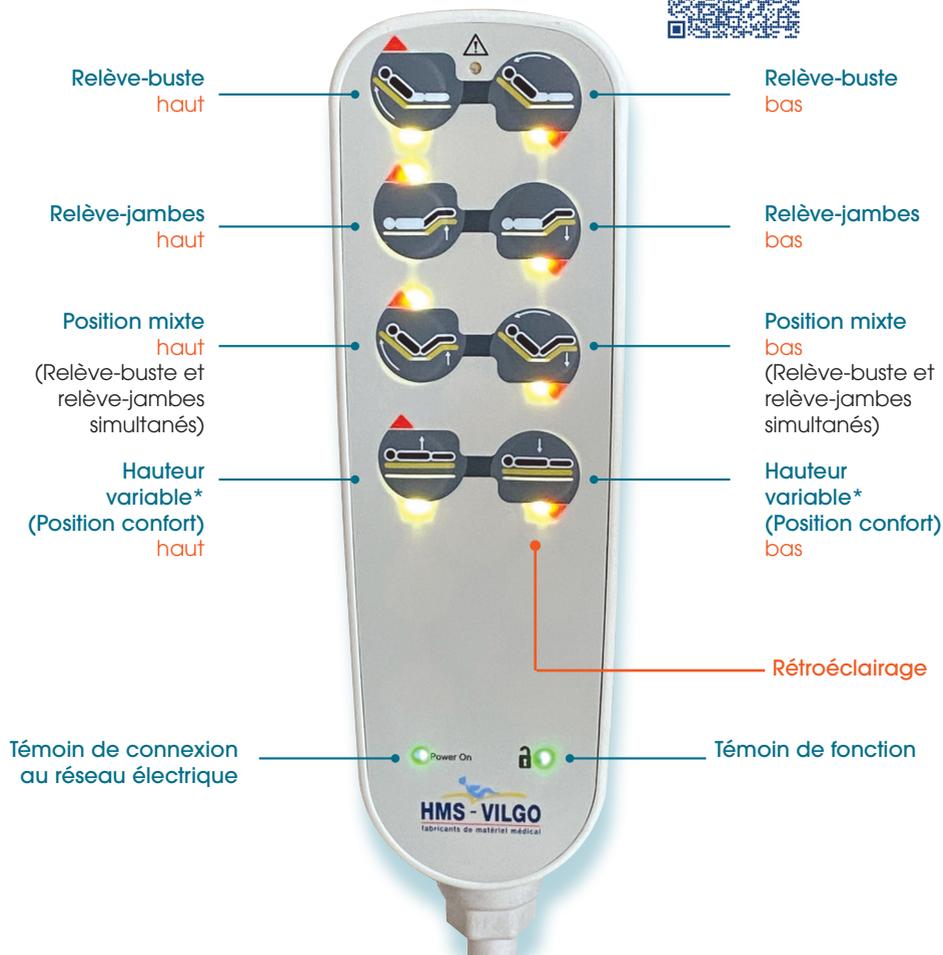

***Position confort et sécurité : Hauteur du lit qui facilite le lever et le coucher. Appuyer sur la fonction de la hauteur variable jusqu'à l'arrêt intermédiaire de la montée ou de la descente.**

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE



Lire attentivement la présente fiche d'utilisation et respecter scrupuleusement les consignes et recommandations ci-dessus. AFSSAPS recommandations 24/07/2002

Rétroéclairage : Lorsque la télécommande est utilisée, celle-ci s'allume pendant 1 minute et s'éteint automatiquement (veille).
Pour l'allumer à nouveau, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

Certaines fonctions de la télécommande peuvent être verrouillées par le personnel soignant ou l'aidant en cas de besoin, seuls est habilités à modifier l'inhibition des fonctions.

En cas de coupure de courant, la télécommande récupère automatiquement la programmation précédente. Aucune manipulation n'est donc nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le lit doit toujours être branché sur une prise dédiée ; dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, vous devez vous assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celles du lit (220-230 volts, 50/60 hertz).
- La fiche d'alimentation doit être débranchée avant tout déplacement du lit ; pendant le déplacement, le câble doit être enroulé sur l'enrouleur et ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes.
- Lors de toute manipulation, veillez à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et à ne pas faire de nœuds.
- Lorsque le lit n'a pas à être déplacé, assurez-vous qu'au moins deux des quatre freins de roulettes sont enclenchés.
- Maintenez votre lit propre : en cas de salissures, nettoyez-le avec une éponge humide et du savon ou une lingette désinfectante.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles : si la moindre altération est constatée, ou si une intervention technique est nécessaire, contactez votre Technicien.
- Ne pas laisser à la disposition des enfants.
- Après avoir donné les soins au patient, le lit doit toujours être remis en position basse afin d'éviter les chutes.

Votre lit médicalisé est un dispositif médical, destiné à améliorer les soins, votre mieux-être et votre confort : entretenez-le comme tel, à l'exclusion de toute autre fonction. Votre responsabilité pourrait être engagée.