

Notice de connexion et d'utilisation



Motorisation trois fonctions Euro 2002


IP 67

1. MEGAMAT 20 : Vérin hauteur variable	SV 7145
2. MEGAMAT 20 : Vérin relève buste	SV 7149
3. MEGAMAT 20 : Vérin relève jambe	SV 7153
4. Boîtier de connexion CV20/M5 IPS	SV 7147
5. Télécommande 8 Boutons	SV 7151
6. Câble alimentation électrique	SV 7148
7. Câble de connexion : Vérin relève buste	SV 7150
8. Câble de connexion : Télécommande	SV 7152
9. Câble de connexion : Vérin relève jambe	SV 7146
10. Bouchon	SV 7154



***Position confort et sécurité :**
Hauteur du lit qui facilite
le lever et le coucher.
Appuyer sur la fonction de
la hauteur variable jusqu'à
l'arrêt intermédiaire de la
montée ou de la descente.

NOUVEAU

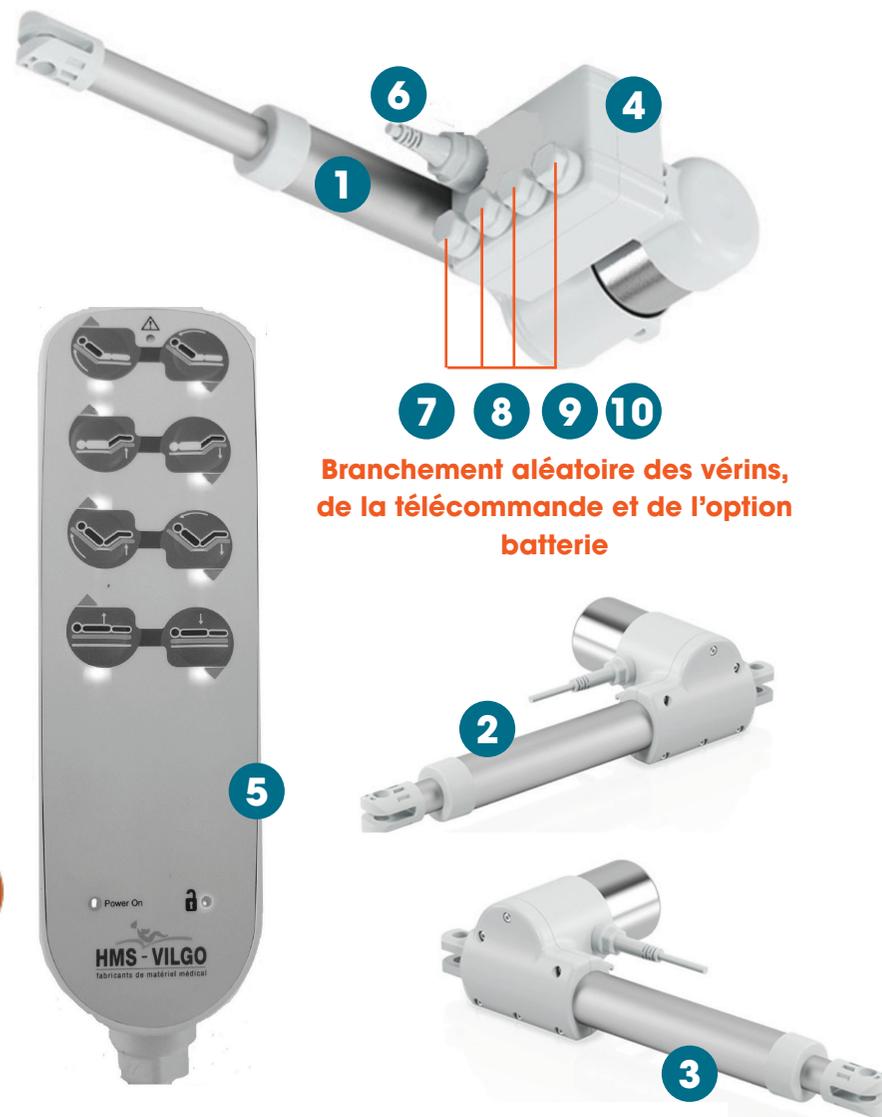

Branchement aléatoire des vérins,
de la télécommande et de l'option
batterie

Notice de connexion et d'utilisation



Télécommande trois fonctions Euro 2002

	Power On		FONCTION
1			Télécommande hors tension.
2			Télécommande active pour le patient.
3			Télécommande en veille (rétroéclairage éteint).
4			Mode verrouillage et déverrouillage des fonctions.
5			Mode personnel soignant ou aidant. Toutes les fonctions sont actives.

1 : La télécommande est hors tension. Vérifier le branchement.

2 : La télécommande est sous tension et active pour l'utilisation du patient.


3 : Télécommande en veille (après 1 min non utilisée). Appuyer sur un bouton pour l'activer.

4 : Verrouillage / déverrouillage des fonctions : Poser le badge 2 fois de suite à l'arrière de la télécommande. Sélectionner les fonctions à verrouiller en appuyant 1 fois sur chacune (le rétroéclairage s'éteint pour chaque fonction verrouillée).

Valider en passant le badge encore une fois à l'arrière de la télécommande.

5 : Passer le badge une fois à l'arrière de la télécommande. Le personnel soignant peut ainsi utiliser toutes les fonctions de la télécommande même si certaines sont verrouillées pour le patient.

En cas de coupure de courant, la télécommande récupère automatiquement la programmation précédente. Aucune manipulation n'est donc nécessaire.

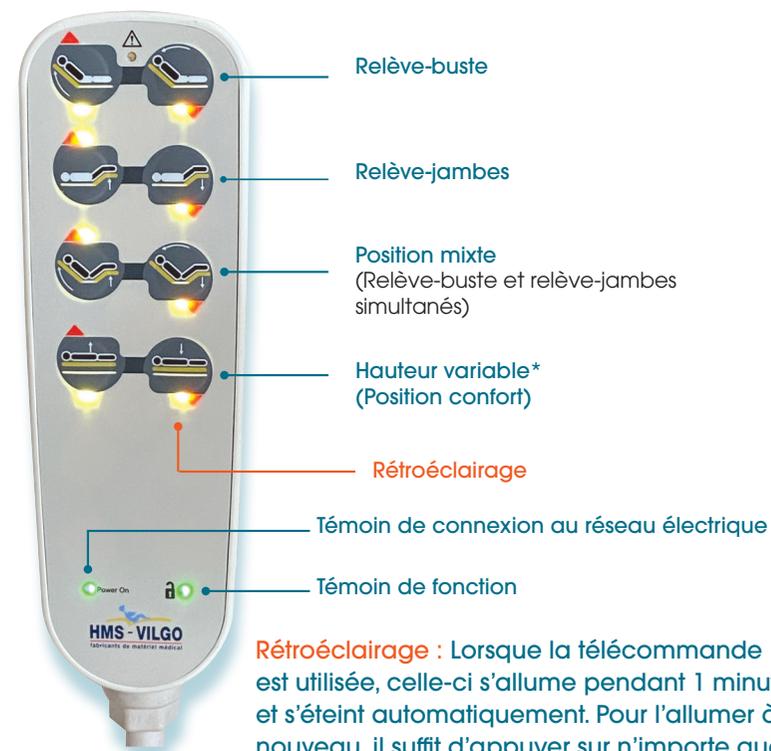

Rétroéclairage : Lorsque la télécommande est utilisée, celle-ci s'allume pendant 1 minute et s'éteint automatiquement. Pour l'allumer à nouveau, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.



Verrouillage et déverrouillage des fonctions en posant le badge à l'arrière de la télécommande (confirmation par un bip)

Attention, le badge de verrouillage ne doit pas être laissé au patient. Seul le personnel soignant, l'aidant ou le prestataire de santé sont habilités à verrouiller les fonctions.